

# Направлення

на консультативні імуногематологічні аналізи

Печатка ЛПЗ

Лікарня \_\_\_\_\_  
Відділення \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_  
До імунологічної  
лабораторії ХОЦСК

Прошу виконати аналіз \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я та по-батькові пацієнта \_\_\_\_\_

Дата народження \_\_\_\_\_

Адреса проживання \_\_\_\_\_

Анамнез:

• Трансфузійний \_\_\_\_\_  
(переливання компонентів крові, \_\_\_\_\_  
дати)

• Акушерський \_\_\_\_\_  
(вагітності, дати)

Результати попередніх аналізів \_\_\_\_\_  
(група, резус, антитіла)

Яке лікування проводиться \_\_\_\_\_  
(для вагітних жінок)

Примітки:

1. Пробірка з кров'ю повинна бути промаркована.
2. Зразок крові в кількості 5-6 мл.

П.І.Б. лікуючого лікаря;  
контактний номер тел.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Вимоги до зразка для консультаційних імуногематологічних аналізів**

1. Зазначити прізвище, ім'я пацієнта на етикетці одноразової пробірки.
2. Узяти 5 мл венозної крові в підготовану відповідно до п.1 одноразову пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об'єми крові (1-3 мл)!
3. Заповнити супровідну документацію (Направлення на консультативні імуногематологічні аналізи, Направлення для проведення індивідуального підбору/проб сумісності).
4. Якщо аналізи планується проводити:
  - 4.1 в день взяття зразка:
    - витримати зразок при температурі +18 - +22°C 30 хвилин до повного утворення згустку або помістити в термостат при 37°C на 15 хвилин;
    - центрифугувати зразок 10± 5 хвилин при 1500 об/хв.
  - 4.2. наступного дня:
    - відокремити згусток від стінок пробірки і помістити в холодильник при температурі 2-6°C;
    - наступного дня зразки крові центрифугувати 10± 5 хвилин при 1500 об/хв (за потребою).
5. Транспортувати зразок до лабораторії ХОЦСК у спеціальних контейнерах, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах.
6. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в контейнер або бікс.
7. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є:
  - відсутність маркування на пробірках;
  - відсутність направлення на аналіз;
  - невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації;
  - невідповідність об'єму крові (занадто малий об'єм для проведення досліджень);
  - порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового ланцюга»);
  - наявність гемолізу;
  - наявність хільозу.

\*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок